

# FICHA TÉCNICA

# CLIN CLOR 1%

Desinfetante Hospitalar p/Superfícies Fixas e Artigos não Críticos

**CLIN CLOR 1% é um desinfetante hospitalar a base de Hipoclorito de Sódio, contendo 1% (p/p) de Cloro Ativo. Apresenta comprovada ação bactericida, sendo portanto, próprio para uso na desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos.**

## CARACTERÍSTICAS

Aspecto ..... Líquido  
pH .....  $12,0 \pm 0,5$   
% Cloro ativo ..... 1%

## COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio e Água

**Indicações:** Indicado para a desinfecção de superfícies fixas hospitalares laváveis e não metálicas, tais como paredes, balcões, pisos, mesas, cadeiras e demais locais e utensílios relacionados com o atendimento à saúde pública.

**Modo de usar:** Usar o produto puro. Deixar agir por 10 minutos. Esfregar e enxaguar, se necessário.

**Composição:** Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio e Água.

**Componente ativo:** Hipoclorito de Sódio

**Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele. Usar luvas para sua aplicação. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misture com produtos à base de amoníaco. Proibido reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.**

Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem bem fechada, protegida do sol e do calor.

**Medidas de Primeiros Socorros:** Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação, levar a pessoa a um local ventilado. Em todos os casos, consultar imediatamente o serviço de saúde ou Centro de Intoxicações CEATOX - Centro de Intoxicações (0800-722-6001), levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**Armazenamento:** Armazenar em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.

*Clarín*  
Purificando ambientes

Produzido por Clarin Ind. e Comércio Ltda.

CNPJ: 07.031.403/0001-47 - Rodovia Alagoinhas - S/Nº - Centro - Inhambupe/BA - CEP: 48.900-000

Químico Responsável: Gabriella Torres do Nascimento Souza - CRQ: 072000726

Aut. Fun / MS: 3.039-10-8

REGISTRADO MS Nº 3.3910.0004

**SAC** (71) 99716-4194 | producao@clarinba.com.br