

# FICHA TÉCNICA

# CLIN DHC

## Desincrustante Alcalino

Clin DHC é um detergente líquido alcalino, concentrado, desenvolvido para limpeza e desincrustação de utensílios e instrumentos cirúrgicos.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto ..... Líquido incolor

pH ..... 11,50 - 12,50

### COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de Sódio, Coadjuvante, Tensoativo Aniônico, Hidrotopo, Alcalinizante, Mistura de Isotiazolinoínas e Água

### Indicações de Uso:

É indicado como detergente desincrustante no processo de pré-lavagem e assepsia de instrumentos cirúrgicos em geral.

### Modo de Usar:

- 1) Diluir o produto na proporção de até 1:50 (para cada mL do produto adicionar 50 mL de água).
- 2) Imergir os instrumentos na solução, deixar de molho por cerca de 10 minutos. Em seguida, esfregar cuidadosamente com escova apropriada e realizar enxague.

**Composição:** Hidróxido de Sódio, Coadjuvante, Tensoativo Aniônico, Hidrotopo, Alcalinizante, Mistura de Isotiazolinoínas e Água. Contém Tensoativo Biodegradável.


**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO:** Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Provoca lesões oculares graves. **ATENÇÃO!** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

**Primeiros Socorros: EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. **NÃO** provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o **CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA – Ceatox (0800 722 6001)**.

**Tratamento específico: Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO.** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem bem fechada e protegida do sol e do calor. Ao manusear o produto, abra cuidadosamente a tampa da embalagem, se possível com uso de utensílio específico.

**Armazenamento:** Armazenar em local limpo, seco, arejado e protegido do sol e do calor.

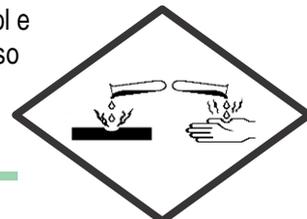

**Clarín**  
Purificando amb

Produzido por Clarín Ind. e Comércio Ltda.

CNPJ: 07.031.403/0001-47 - Rodovia Alagoinhas - S/Nº - Centro - Inhambupe/BA - CEP: 48.900-000

**SAC** (71) 99716-4194 | producao@clarinba.com.br